

tiki
medical



Eine Revolution in der Atemschutztechnik

HERGESTELLT IN SCHWEDEN



Zur Erleichterung Ihrer Arbeit entwickelt

Tiki medical ist eine innovative, in Schweden hergestellte Atemschutzmaske für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, in denen ein Schutz gegen luftgetragene Partikel und Bakterien erforderlich ist. Tiki medical ist speziell für den medizinischen Einsatz konzipiert und daher besonders geeignet für den Einsatz im Pflege- und Rettungsdienst. Die Maske filtert die Luft sowohl nach innen als auch nach außen und ist nach der höchsten Sicherheitsklasse für motorbetriebene luftreinigende Atemschutzmasken (EN 12942 TM3P) zertifiziert.

Optimaler Schutz trifft auf optimalen Komfort

Bei der Entwicklung von Tiki stand der Benutzerkomfort im Vordergrund, auch bei langen Arbeitszeiten.

Gebläse mit variablen Drehzahlen

Dank des in der Maske eingebauten drucksensitiven Sensors kann die Drehzahl des Gebläses an Ihre Atmung angepasst werden, was zu einem optimalen Benutzerkomfort führt.

Ergonomische Passform

Die Maske ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Small, Medium und Large - damit sie auf die unterschiedlichsten Gesichter passt.

Leichtgewicht

Im Gegensatz zu vielen anderen Atemschutzmasken auf dem Markt ist die Tiki medical ein Leichtgewicht und wiegt je nach Größe nur zwischen 430-450 Gramm.

Ungehinderte Sicht und einfache Kommunikation

Da sich der Inhalationsfilter im oberen Teil der Maske befindet, ist Ihre Sicht sowohl nach unten als auch zu den Seiten hin ungehindert. Der Ausatemfilter wird am Kinn platziert, so dass der Mund sichtbar ist. Dieses Design erleichtert sowohl die visuelle als auch die verbale Kommunikation. Sie können das Gesicht des anderen sehen und sogar telefonieren, während Sie die Maske tragen. Zusammen mit dem eingebauten LED-Beleuchtungssystem ermöglicht Tiki das Arbeiten auch bei Dunkelheit oder unter beengten Verhältnissen.

Frei atmen zu können, einen ungehinderten Blick und gleichzeitig höchste Sicherheit zu haben, sind nur einige Vorteile der Tiki medical.






Die Tiki Atemschutzmaske wird betrieben durch einen internen Akku mit einer Betriebszeit von 1-2,5 Stunden, je nach Belastung. Für diejenigen, die eine längere Akkulaufzeit benötigen, ist eine externe Akkueinheit als Zubehör erhältlich. Die Gebläseeinheit ist außerdem mit LED-Leuchten ausgestattet, die das Arbeiten bei Dunkelheit erleichtern.



Der Partikelfilter schützt vor allen Arten von partikelförmigen Schadstoffen (P3). Filter und Maske können schnell und einfach gewechselt werden. Der Filter ist quadratisch geformt, um maximale Filterfläche und lange Standzeit zu erreichen.

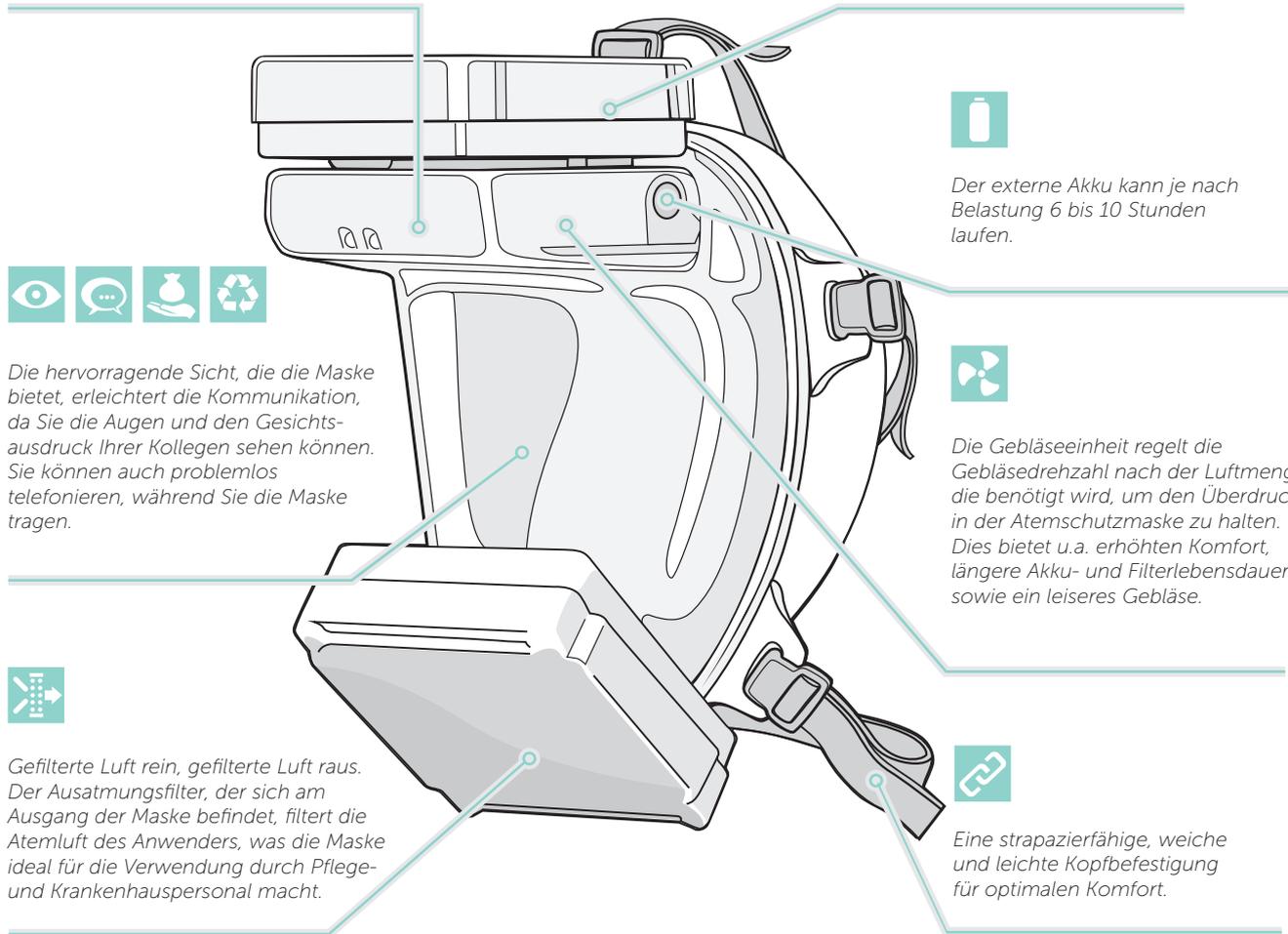

Die hervorragende Sicht, die die Maske bietet, erleichtert die Kommunikation, da Sie die Augen und den Gesichtsausdruck Ihrer Kollegen sehen können. Sie können auch problemlos telefonieren, während Sie die Maske tragen.



Der externe Akku kann je nach Belastung 6 bis 10 Stunden laufen.



Die Gebläseeinheit regelt die Gebläsedrehzahl nach der Luftmenge, die benötigt wird, um den Überdruck in der Atemschutzmaske zu halten. Dies bietet u.a. erhöhten Komfort, längere Akku- und Filterlebensdauer sowie ein leiseres Gebläse.



Gefilterte Luft rein, gefilterte Luft raus. Der Ausatemungsfilter, der sich am Ausgang der Maske befindetet, filtert die Atemluft des Anwenders, was die Maske ideal für die Verwendung durch Pflege- und Krankenhauspersonal macht.



Eine strapazierfähige, weiche und leichte Kopfbefestigung für optimalen Komfort.

Wie funktioniert Tiki?

Tiki sorgt für einen positiven Druck innerhalb der Maske. Der Überdruck wird durch ein batteriebetriebenes Gebläse erzeugt, das die Luft durch einen Reinigungsfilter in die Maske saugt. Mit Hilfe eines eingebauten druckempfindlichen Sensors hält die Maske den Überdruck vollständig im Einklang mit Ihrer Atmung, was im Vergleich zu einer herkömmlichen Atemschutzmaske einen höheren Komfort bietet. Diese Art der individuellen Anpassung hat den zusätzlichen Vorteil, dass sowohl die Akkulaufzeit als auch die Filterlebensdauer verbessert wird. Die Maske verfügt außerdem über ein eingebautes Warnsystem, das Sie darauf hinweist, wenn die Akkuleistung zu gering

ist, wenn der Maskendruck nicht stimmt oder wenn der Filter verstopft ist oder ausgewechselt werden muss.

Einfach zu verwenden

Tiki medical setzt sich aus fünf Komponenten zusammen: Gebläse, Inhalationsfilter (weiß), Ausatemungsfilter (grün), Maske und Kopfbefestigung. Tiki ist sofort einsatzbereit, sobald Sie ihre leicht verstellbare Kopfbefestigung fixiert haben. Der Filter kann schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Auch die Maske selbst kann schnell und einfach gewechselt werden, wenn sie zerkratzt oder verschmutzt ist.



Zehn gute Gründe, sich für Tiki medical zu entscheiden

- Einzigartiger Atemschutz, der die Luft sowohl nach innen als auch nach außen filtert
- Höchste Schutzklasse nach europäischen Normen
- Äußerst komfortabel durch seine sensorgesteuerte Luftzufuhr
- Leichtgewicht: ab nur 430 Gramm
- Bietet hervorragende Sichtbarkeit und Kommunikation
- Lange Akkulaufzeit: bis zu zehn Stunden bei Verwendung eines externen Akkus
- Quadratischer P3-Filter für optimale Leistung und lange Lebensdauer
- Eingebaute LED-Beleuchtung
- Maske und Filter können schnell und einfach gewechselt werden
- Wirtschaftlich: niedrige Gesamtbetriebskosten



TIKI SAFETY INFODE 1091-23 01/2021

Auf tikimed.com
finden Sie mehr Infos
und Fakten über Tiki.

Denken Sie an die Umwelt

Da die Maske und der Filter wiederverwendet werden können, ist der Abfall im Vergleich zu Einwegprodukten geringer. Außerdem ist die Maske aus den Kunststoffen PET-G und TPE hergestellt und kann recycelt werden. In der Fertigung wird nur Ökostrom aus nachhaltigen Quellen verwendet und Tiki arbeitet aktiv daran, den Abfall in der Produktion kontinuierlich zu reduzieren.

Tiki ausprobieren

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie mehr wissen, ein Angebot einholen oder Tiki ausprobieren möchten.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns noch heute eine Mail!

+46 8-353 249 (werktags 8-17 Uhr GMT)
info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
SCHWEDEN

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797

