

Opzetinstructies (1/2)


Belangrijke informatie:

- Het masker biedt bescherming tegen ademdruppeltjes en tegen de overbrenging van deeltjes via aerosolen.
- Het masker heeft een afzonderlijke blaas- en batterij-unit die is aangesloten op een HEPA-filter (P3).
- De blazer creëert een positieve druk in het masker waardoor de gebruiker makkelijk kan ademen.
- Voer voor het aantrekken altijd een fit-test uit (zie aparte instructies)

1 Zorg dat het masker niet zichtbaar beschadigd of vervuild is en dat de batterij volledig is opgeladen.



2 Bevestig de witte inademfilter bovenop het masker door hem in een hoek van 30 graden te zetten en hem voorzichtig naar rechts te draaien. Plaats uw vingers onderaan de blazer aan de binnenkant van het masker en oefen tijdens het draaien een lichte opwaartse druk uit. Zo voorkomt u schade aan de afdichting.

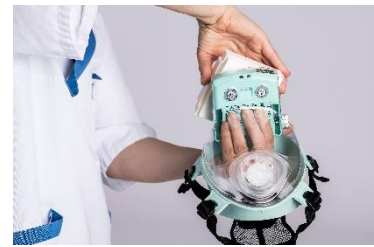

3 Bevestig het groene uitademfilter door het filter in een hoek van 30 graden over de bajonetopening van de ventilator te plaatsen. Druk hem voorzichtig naar beneden en draai hem naar rechts. Obs: Forceer het niet op zijn plaats. U moet een lichte klik horen terwijl u het filter in de bajonet draait.



4 Reset de blaasunit:
 1) Houd het masker op zijn kop.
 2) Druk tegelijkertijd op de twee knoppen totdat de twee diodes aan de rechterkant (voor u links) branden en de meest rechtse diode stopt met knipperen (de blazer start niet).
 3) Laat de knoppen los.

De blazer is nu gereset.



5 Zet het masker op.



*** OPMERKING:** Soms kan het moeilijk zijn om het filter te bevestigen als het nieuw is. Gebruik in dat geval geen kracht, dit kan de schroefdraad beschadigen! Zorg er in plaats daarvan voor dat u het filter strak tegen de draad en recht houdt. Draai dan weer met een lichte maar gelijkmatige druk en oefen tegelijkertijd een lichte druk naar boven uit met je andere hand onder de ventilator. Als het filter correct is bevestigd, moet u een zachte weerstand voelen en moet het filter parallel met de ventilator zitten. Hoe vaker u het filter gebruikt, hoe gemakkelijker het is om het te bevestigen.

Opzetinstructies (2/2)

6 Zorg ervoor dat het masker stevig op het gezicht zit, maar niet te strak om ongemak te veroorzaken. Als u deze moet bijstellen, span dan altijd de banden van boven naar beneden aan, d.w.z. pas eerst de bovenste riem van het harnas aan en trek deze indien nodig aan. Voel de pasvorm aan de zijkanten en pas indien nodig iets aan beide banden aan de zijkanten van het masker aan. Pas indien nodig de band zo nodig het dichtst bij uw kin aan. Als het masker te strak op uw gezicht zit, maakt u de bandjes iets losser.

Zorg ervoor dat niets de verzegeling rond het gezicht verduistert (zoals haar of een haarbedekking) dat lekken kan veroorzaken.



7 Zet het apparaat aan door de powerknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Haal een paar keer diep adem. De blaasunit zal de snelheid hier automatisch op aanpassen en de luchtstroom optimaliseren.



8 Test het alarm door twee vingers tussen de afdichting en uw gezicht te steken, zodat er een opening is.

Het alarm zou na ongeveer 2 seconden moeten afgaan. U hoort dan iedere seconde een pieptoon en ziet een licht knipperen.

Als de opening weer dicht is, zou het alarm na een paar seconden weer moeten stoppen.



DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Gebruiksaanwijzing

- Als de blazer aan staat, brandt het linkerlampje altijd.
- Om de snelheid van de blaasunit aan te passen, drukt u meerdere keren op de aan/uit-knop. De snelheid verandert per keer licht. U hoort en voelt dat de snelheid verandert. Zodra de blazer weer afwisselt tussen snel en langzaam, staat hij in de automatische modus.
- Als het rechterlampje gaat knipperen en u iedere 5 seconden een alarm hoort, is de batterij bijna leeg en is het masker nog ongeveer 15 minuten te gebruiken.
- U kunt een externe batterij aansluiten op het masker. Dit verlengt de gebruikstijd met maximaal 10 uur.
- Druk op de knop "Licht aan/uit" om de ingebouwde ledlampjes aan of uit te zetten.
- Als de twee lampjes aan de rechterkant beginnen te knipperen en u elke (één) seconde een hoorbaar alarm hoort, geeft dit aan dat het maskerfilter verstopt is of dat er een groot lek is dat onderdruk in het masker veroorzaakt. Verlaat het gebied onmiddellijk.
 - Als de blazer waarschuwt voor een bijna lege batterij, verlaat dan onmiddellijk de ruimte en laad de blazer op volgens de instructies voordat u het masker verder gebruikt.
 - Als de blazer waarschuwt voor onderdruk in het masker, verlaat dan onmiddellijk het gebied en vervang het filter. Mocht er nog steeds een onderdrukalarm zijn, controleer dan op lekken en of het masker beschadigd is.

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Afzetinstructies

1 Zet het masker af door aan de bandlussen te trekken.



2 Trek het masker over uw hoofd heen en zorg dat het niet in contact komt met uw kleding.



3 Zorg dat u uw gezicht en de voorkant van het masker niet aanraakt.



4 Leg het masker op een daarvoor aangewezen plek.



DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Het Tiki-masker opladen

1 Verwijder de schroefafdichting aan de linkerkant van het masker. Zorg dat u deze schroefafdichting op een veilige plek bewaart.



2 Sluit de stekker aan door de drie pinnen uit te lijnen en de stekker in het masker te steken. Laad het masker op tot het lampje op de oplader groen is. Zorg dat u de lader loskoppelt als de batterij vol is.



DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Een externe batterij aansluiten

1 Pak de batterijkabel en haal deze door de lus aan de linkerkant van het bandje.



2 Sluit de externe batterij aan op de kabel.



3 Verwijder de schroefafdichting aan de linkerkant van het masker. Zorg dat u deze schroefafdichting op een veilige plek bewaart.



4 Sluit de batterijkabel aan op het masker door de drie pinnen uit te lijnen en de stekker in het masker te steken. Draai de kabelschroef vast. Zorg dat de kabel niet in de knoop zit.



5 Zet het apparaat aan door de powerknop 3 seconden ingedrukt te houden.



6 Doe de externe batterij in een zak of maak hem met de clip vast aan uw kleding of riem voor het meeste gebruiksgemak.



LET OP! De externe batterij moet van de blazer worden losgekoppeld als u het masker niet gebruikt. Anders loopt hij leeg.

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Schoonmaakinstructies (1/2)

1 Verwijder de filters door ze 30 graden naar links te draaien.

Als de filters opnieuw moeten worden gebruikt, reinig ze dan met desinfectiemiddel op dezelfde manier als het masker. Gooi de filters anders op de daarvoor bestemde plaats.



2 Leg het masker op een ontsmet oppervlak.



Moet u de blaasunit loskoppelen?

Als u de batterij moet vervangen of als u het masker met iemand deelt en het dus volledig moet schoonmaken, moet u voor het schoonmaken de blaasunit loskoppelen. **Zo niet, ga dan door naar stap 5.**

3 Verwijder de schroefafdichting aan de linkerkant van het masker. Zorg dat u deze schroefafdichting op een veilige plek bewaart.



4 Plaats één hand aan de binnenkant van het masker, met uw duim tussen het masker en de blazer en de andere vingers onder de blazer. Leg de duim van uw andere hand op het gat boven de blazer en druk langzaam omlaag totdat de blazer loskomt. Trek de blaasunit los. Dit moet mogelijk zijn zonder dat u kracht moet gebruiken.



Schoonmaakinstructies (2/2)

5 Pak een papieren doekje en doe er een royale hoeveelheid ontsmettingsmiddel met tensiden op.



6 Begin aan de buitenkant.



7 Ga verder met de elastische bandjes. Wees extra voorzichtig op plekken met inkepingen, zoals klemmen.



8 Pak een nieuw doekje met ontsmettingsmiddel en maak de binnenkant van het masker schoon.



9 Wees voorzichtig bij de binnenkant van de blazer. De blaasunit (en de filters) mogen nooit worden ondergedompeld in vloeistof.



10 Laat het masker drogen tot het volgende gebruik.



DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.

Pasinstructies

Het medische Tiki-masker is verkrijgbaar in drie maten: klein, medium en groot.

Test voor het gebruik of het masker past om zeker te weten dat het masker het juiste formaat heeft en de afdichting uw gezicht beschermt. Test het masker zonder de blaasunit en zonder de filters.

1 Zet het masker op (zonder blaasunit of filters) en verstel de bandjes zodat het masker comfortabel zit, maar niet te strak.



2 Leg een plat vel papier bovenop het masker en zorg dat het de twee gaten afdekt. Leg tegelijkertijd een vinger op de laadopening aan de zijkant van het masker.



3 Probeer voorzichtig om in te ademen.



Als het masker goed zit, zou u niet moeten kunnen inademen en drukt het masker op uw gezicht als u het probeert.

Als het masker niet goed zit, zult u merken dat er lucht in het masker lekt. Probeer uit te vinden waar het lek zit en probeer het te verhelpen. Misschien moet u alleen de bandjes strakker trekken of een ander formaat masker kiezen. Ook andere oorzaken kunnen een goede afdichting in de weg staan. Denk aan een grote baard, een bril of haren die tussen de afdichting doorkomen.

Als het masker lucht blijft lekken en u de test niet met succes kunt doen, mag u het masker niet gebruiken.

DISCLAIMER: Deze snelgids dient niet ter vervanging van de gebruiksaanwijzing. Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker volledig bekend en vertrouwd is met het Tiki-masker, de omgeving waarin het wordt gebruikt, de gevaren van een dergelijke omgeving, richtlijnen voor de werkplek en lokale wetten en beperkingen.