

Instructions de port (1/2)

Information importante :

- Le masque complet protège contre les gouttelettes respiratoires et la transmission des particules par aérosol
- Le masque comprend un souffleur et une batterie séparés connectés à un filtre HEPA (P3)
- Le souffleur crée une pression positive dans le masque, ce qui facilite la respiration
- Avant de mettre, effectuez toujours un test d'ajustement (voir les instructions séparées)

1 Assurez-vous qu'il n'y ait aucun dommage ou débris visible sur le masque et que la batterie soit complètement chargée.



2 Attachez le filtre blanc d'inhalation sur le dessus du masque, en le plaçant à un angle de 30 degrés et en le tournant soigneusement vers la droite. Pour éviter d'endommager le joint, placez vos doigts sous le souffleur à l'intérieur du masque et appliquez une légère pression vers le haut lors de la torsion.



3 Fixez le filtre d'expiration vert en plaçant le filtre dans un angle de 30 degrés sur l'ouverture à baïonnette du ventilateur. Appuyez doucement dessus et tournez-le vers la droite. Obs: ne le forcez pas en place. Vous devriez entendre un léger clic lorsque vous tournez le filtre dans la baïonnette.



4 Réinitialisez le souffleur en :
 1) tenant le masque à l'envers
 2) appuyant simultanément sur les deux boutons jusqu'à ce que les deux diodes à droite (à gauche de votre point de vue) soient allumées et que la diode la plus à droite cesse de clignoter (le souffleur ne doit pas démarrer)
 3) Relâchez les boutons.

Le souffleur est maintenant réinitialisé.



5 Portez le masque.



** REMARQUE: il peut parfois être difficile de fixer le filtre lorsqu'il est neuf. Si tel est le cas, ne forcez pas, cela pourrait endommager les filetages! Assurez-vous plutôt de maintenir le filtre fermement contre le filetage et droit. Puis tournez à nouveau avec une pression légère mais constante et en même temps appliquez une légère pression vers le haut avec votre autre main sous le ventilateur. Lorsque le filtre est correctement fixé, vous devriez ressentir une résistance douce et le filtre doit être parallèle au ventilateur. Plus vous utilisez le filtre, plus il est facile de le fixer.*

Instructions de port (2/2)

6 Assurez-vous que le masque est ferme sur le visage, mais pas trop serré pour causer de l'inconfort. Si vous avez besoin de l'ajuster, serrez toujours les sangles de haut en bas, c'est-à-dire ajustez d'abord la sangle supérieure du harnais et serrez-la si nécessaire. Sentez l'ajustement sur les côtés, et si nécessaire ajustez légèrement les deux sangles sur les côtés du masque. Ajustez la sangle la plus proche de votre menton uniquement si nécessaire. Si le masque est trop serré sur votre visage, desserrez légèrement les sangles.

Assurez-vous que rien n'obscurcit le joint autour du visage (comme des cheveux ou une couverture capillaire) qui pourrait provoquer des fuites.



7 Démarrez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation appuyé pendant 3 secondes.

Prenez quelques respirations profondes. Le souffleur ajustera automatiquement la vitesse et optimisera le débit d'air.



8 Testez l'alarme en insérant deux doigts entre le joint et le visage afin qu'il y ait un écart.

L'alarme devrait retentir au bout de 2 secondes avec un clignotement et un bip toutes les secondes.

Une fois l'écart fermé, l'alarme doit s'arrêter au bout de quelques secondes.



MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Mode d'emploi

- Le voyant de gauche est toujours allumé lorsque le souffleur est en marche.
- Pour régler la vitesse du souffleur, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton marche/arrêt. La vitesse s'ajuste légèrement à chaque clic. Vous entendez et ressentez le changement de vitesse. Une fois que le souffleur passe à nouveau de rapide à lent, il est en mode automatique.
- Si le bon voyant commence à clignoter et que vous entendez une alarme sonore toutes les 5 secondes, l'autonomie de la batterie devient faible et il reste env. 15 minutes d'autonomie.
- Il est possible de connecter une batterie externe au masque. Cela prolonge la durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures supplémentaires.
- Appuyez le bouton indiqué « Light on/off » (« Marche/arrêt éclairage ») pour allumer et éteindre l'éclairage à LED intégré.
- Si les deux voyants de droite commencent à clignoter et que vous entendez une alarme sonore toutes les (une) seconde, cela indique que le filtre du masque est bloqué ou qu'il y a une fuite majeure provoquant une pression négative dans le masque. Quittez la zone immédiatement.
 - Si le ventilateur vous avertit d'une batterie faible, quittez immédiatement la zone et chargez le ventilateur conformément aux instructions avant de continuer à utiliser le masque.
 - Si le ventilateur avertit d'une pression négative dans le masque, quittez immédiatement la zone et changez le filtre. S'il y a encore une alarme de pression négative, vérifiez s'il y a des fuites ou si le masque est endommagé.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Instructions de retrait

1 Retirez le masque en tirant sur les boucles de la sangle.



2 Soulevez-le et passez-le par-dessus la tête et assurez-vous que le masque ne touche pas vos vêtements.



3 Évitez de toucher le visage et l'avant du masque.



4 Placez le masque sur une zone désignée.



MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Charger le masque Tiki

1 Retirez le joint à vis sur le côté gauche du masque. Assurez-vous de conserver le joint à vis retiré dans un endroit sûr.



2 Connectez les fiches en alignant les trois broches et enfoncez la fiche. Chargez jusqu'à ce que le voyant du chargeur devienne vert. Assurez-vous de débrancher le chargeur lorsque la batterie est pleine.




MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Attacher la batterie externe

1 Prenez le fil de la batterie et faites-le passer dans le trou de boucle du côté gauche de la sangle.



2 Connectez la batterie externe au fil.

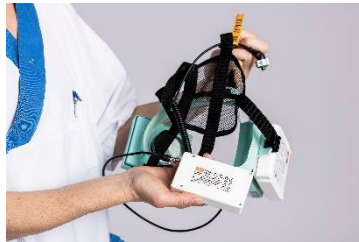

3 Retirez le joint à vis sur le côté gauche du masque. Assurez-vous de conserver le joint à vis retiré dans un endroit sûr.



4 Connectez le fil de la batterie au masque en alignant les trois broches et enfoncez la fiche. Serrez la vis du fil. Assurez-vous que le fil ne soit pas emmêlé.



5 Démarrez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation appuyé pendant 3 secondes.



6 Mettez la batterie externe dans une poche ou attachez-la avec le clip sur vos vêtements ou votre ceinture pour plus de commodité.



REMARQUE ! La batterie externe doit être déconnectée du ventilateur lorsque le masque n'est pas utilisé, sinon elle se décharge.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Instructions de nettoyage (1/2)

1 Retirez les filtres en les tournant de 30 degrés vers la gauche.

Si les filtres doivent être réutilisés, nettoyez-les avec un désinfectant de la même manière que le masque. Sinon, jetez les filtres dans la zone désignée.



2 Placez le masque sur une surface décontaminée.



Avez-vous besoin de retirer le souffleur ?

Si vous avez besoin de changer la batterie ou si vous partagez le masque avec quelqu'un d'autre et que vous devez donc le nettoyer entièrement, vous devez retirer le souffleur avant de nettoyer le masque. **Sinon, passez à l'instruction numéro 5.**

3 Retirez le joint à vis sur le côté gauche du masque. Assurez-vous de conserver le joint à vis retiré dans un endroit sûr.



4 Posez une main à l'intérieur du masque, le pouce entre le masque et le souffleur, et les autres doigts sous le souffleur. Prenez l'autre main, posez le pouce sur le trou au-dessus du souffleur et appuyez doucement jusqu'à ce que le souffleur soit libéré. Retirez le souffleur. Aucune force ne devrait être nécessaire pour retirer le souffleur.



Instructions de nettoyage (2/2)

5 Prenez un chiffon en papier et ajoutez une généreuse quantité de désinfectant avec des tensioactifs.



6 Commencez par l'extérieur.



7 Continuez avec les sangles élastiques. Assurez-vous d'être très prudent autour des zones encastrées telles que les clips.



8 Prenez un nouveau chiffon avec du désinfectant et commencez à nettoyer l'intérieur du masque.



9 Soyez prudent avec l'intérieur du souffleur. Le souffleur (et les filtres) ne doit jamais être immergé dans du liquide.



10 Laissez sécher jusqu'à l'utilisation suivante.



MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.

Instructions de test d'ajustement

Le masque médical Tiki est disponible en trois tailles différentes : petite, moyenne et grande.

Avant utilisation, un test d'ajustement doit être effectué pour s'assurer que le masque soit de la bonne taille et se plaque correctement au visage de l'utilisateur. Ni le souffleur ni les filtres ne doivent être attachés au masque lorsque le test est effectué.

1 Mettez le masque (sans souffleur ni filtres) et ajustez les sangles pour vous assurer que le masque s'adapte confortablement mais ne soit pas trop serré.



2 Ajoutez un morceau de papier plat sur le dessus du masque en vous assurant qu'il couvre les deux trous. Appuyez simultanément avec un doigt pour couvrir le trou de chargement sur le côté du masque.



3 Essayez d'inspirer doucement.



Si l'ajustement est correct, vous ne devriez pas pouvoir respirer et le masque devrait se plaquer sur votre visage lorsque vous essayez de respirer.

Si l'ajustement n'est pas correct, vous remarquerez que de l'air fuit dans le masque. Essayez de comprendre où se trouve la fuite et essayez d'y remédier. Peut-être avez-vous juste besoin de resserrer les sangles ou de changer de taille. D'autres choses telles qu'une grande barbe, des lunettes ou des cheveux tombant dans le masque peuvent être des facteurs susceptibles de corrompre l'étanchéité.

Si le masque continue de laisser passer de l'air et que vous ne parvenez pas à effectuer un test concluant, le masque ne doit pas être utilisé.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l'utilisateur et suppose que l'utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l'environnement dans lequel il est utilisé, les dangers d'être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail ainsi que les lois et restrictions locales.