

## Pukeutumisohteet (1/2)

### Tärkeitä tietoja:

- Hengityssuojain suojaa ilmateitse leviäviltä pisaroilta ja aerosolihiukkasilta
- Hengityssuojaimen sisältyy erillinen puhallin- ja akkuyksikkö, joka on kytketty HEPA-suodattimeen (P3)
- Puhallin luo maskiin positiivisen paineen, joka helpottaa hengittämistä ja varmistaa, että maskin sisään ei pääse hiukkasia.
- Suorita aina istuvuuskoete ennen pukemista (katso erilliset ohjeet)

**1** Varmista, että hengityssuojain ei ole vaurioitunut tai likainen ja että akku on ladattu täyteen.



**2** Kiinnitä valkoinen sisäänhengityssuodatin maskin päälle asettamalla se (30) asteen kulmaan ja kiertämällä varovasti oikealle. Vältä tiivisteen vahingoittamista asettamalla sormesi puhaltimen alle maskin sisään ja työntämällä varoen ylöspäin samalla, kun kierrät suodatinta.



**3** Jos tarvitaan ulohengityssuodatinta (vihreä), kiinnitä se samalla tavalla asettamalla (30) asteen kulmaan, painamalla alaspäin ja kiertämällä varovasti oikealle.



**4** Nollaa puhallinyksikkö seuraavasti:  
1) pidä maskia ylösalaisin  
2) paina molempia painikkeita yhtä aikaa kunnes oikealla (sinusta katsoen vasemmalla) olevat kaksi diodia syttyvät ja oikeanpuoleisin diodi lakkaa vilkkumasta (puhallin ei käynnisty)  
3) vapauta painikkeet.

Puhallin on nyt nollattu.



**5** Aseta maski kasvoillesi.



**\* HUOMAUTUS:** Suodattimen ollessa uusi ja käyttämätön, sen lukitseminen saattaa olla hieman vaikeampaa. Jos näin on, älä käytä voimaa, se voi vahingoittaa kierteitä! Sen sijaan varmista, että pidät suodatinta tiukasti suorassa tuulettimeen nähden. Sen jälkeen paina suodatinta kevyesti ja lukitse suodatin kiertämällä sitä oikealle. Helpota lukitsemista pitämällä samalla toista kättäsi tuulettimen alla.

## Pukeutumisohteet (2/2)

**6** Aloita hihnojen kiristäminen ylhäältä ja jatka alimpiin hihnoin. Varmista, että hengityssuojain istuu tiukasti kasvoilla. Vältä kuitenkin liiallista kiristämistä joka saattaa aiheuttaa epämukavuutta. Varmista, että kasvojen ympärillä olevan tiivisteiden ja kasvojen väliin ei ole jäänyt mitään mikä saattaa aiheuttaa vuotoja.



**7** Kytke puhallinyksikkö päälle pitämällä virtapainiketta painettuna (3) sekunnin ajan. Vedä syvään henkeä muutaman kerran. Puhallinyksikkö säättää nopeuden automaattisesti ja optimoi ilmavirtauksen.



**8** Kokeile hälytystä viemällä kaksi sormea tiivisteiden ja kasvojen väliin siten, että niiden väliin muodostuu aukko.

Hälytysääninen pitäisi soida (2) sekunnin kuluessa. Siihen liittyy vilkkuva valo ja piippaus (1) sekunnin välein.

Kun aukko sulkeutuu, hälytyksen pitäisi lakata muutamassa sekunnissa.



*VASTUUVAPAUSSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-hengityssuojaimen, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*

## Käyttöohjeet

---

- Vasen valo palaa aina, kun puhallinyksikkö on päällä.
- Säädä puhaltimen nopeutta painamalla päälle/pois-painiketta toistuvasti. Nopeus muuttuu hieman joka painalluksella. Kuulet ja tunnet nopeuden muutoksen. Kun puhallin vaihtaa taas suuresta nopeudesta matalaan, se on automaattitilassa.
- Jos valo alkaa vilkkua ja kuulet hälytyksen joka (5) sekunti, akku alkaa olla lopussa ja käyttöaika on jäljellä noin (15) minuuttia.
- Maskiin voidaan liittää ulkoinen akku. Tämä pidentää käyttöaika jopa 10:llä lisätunnilla olosuhteista riippuen.
- Sytytä ja sammuta sisäänrakennetut LED-valaisimet painamalla painiketta ”Valo päälle/pois”.
- Jos kaksi oikeanpuoleista varoitusvaloa alkaa vilkkua ja kuulet hälytysäänen joka (2) sekunti, hengityssuojaimen suodatin on tukossa tai huomattava vuoto aiheuttaa maskin sisään alipaineen. Poistu saastuneelta alueelta välittömästi.
  - Jos puhaltimen hälytys varoittaa akun virran loppumisesta, poistu alueelta välittömästi ja lataa puhallin ohjeiden mukaisesti ennen kuin jatkat hengityssuojaimen käyttöä.
  - Jos puhaltimen hälytys varoittaa alipaineesta, poistu alueelta välittömästi ja vaihda suodatin. Jos alipainehälytys toistuu, tarkista onko hengityssuojaimessa vuotoja tai maskiosa vaurioitunut.

*VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*

## Riisumisohteet

**1** Poista maski vetämällä hihnojen lenkeistä.



**2** Vedä maski pään yli ja varmista, että se ei koske vaatteisiisi.



**3** Vältä kasvojen ja maskin etupuolen koskemista.



**4** Aseta maski sille osoitetulle alueelle.



*VASTUUVAPAUCLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*

## Tiki-maskin lataaminen

**1** Poista tiivisteruuvi maskin vasemmalta puolelta kiertämällä sitä käsin vastapäivään. Varmista, että säilytät irrotetun tiivisteruuvin.



**2** Liitä latausjohto kohdistamalla kolme pientä piikkiä puhallinyksikön vastakappaleen reikiin. Työnnä pistoke sisään ja kiristä pistoke kiertämällä ruuvia käsin myötäpäivään. Lataa kunnes laturin latausvalo palaa vihreänä. Varmista, että irrotat laturin kun akku on täynnä.




*VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*

## Ulkoisen akun liittäminen

**1** Vie akun johto hihnan vasemman puolen lenkin läpi.



**2** Liitä ulkoinen akku johtoon.

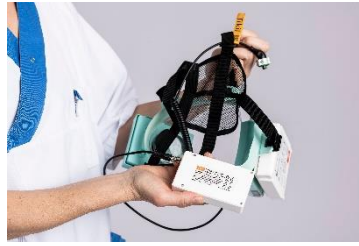

**3** Poista tiivisteruuvi maskin vasemmalta puolelta kiertämällä sitä käsin vastapäivään. Säilytä irrotettu ruuvitiiviste turvassa.



**4** Liitä latausjohto kohdistamalla kolme pientä piikkiä puhallinyksikön vastakappaleen reikiin. Työnnä pistoke sisään, kiristä pistoke kiertämällä ruuvia käsin myötäpäivään ja varmista että johto kulkee vapaasti.



**5** Kytke puhallinyksikkö päälle pitämällä oikean käden puolella olevaa virtapainiketta painettuna (3) sekunnin ajan.



**6** Laita ulkoinen akku taskuun tai kiinnitä se akussa olevalla kiinnittimellä vaatteisiin tai vyölle.



**TÄRKEÄÄ!** Ulkoinen akku tulee irrottaa puhaltimesta silloin, kun maski ei ole käytössä. Jos näin ei tehdä, akku purkautuu.

*VASTUUVAPAUSSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*

## Puhdistusohjeet (1/2)

### 1 Poista suodattimet kiertämällä niitä (30) astetta vasemmalle.

Jos suodattimet käytetään uudelleen, puhdista ne desinfiointiaineella. Muussa tapauksessa hävitä suodattimet tarkoitukseen varatussa paikassa.



### 2 Aseta maski puhtaalle pinnalle.



### Pitääkö puhallinyksikkö irrottaa?

Jos sinun täytyy vaihtaa akku tai jos jaat hengityssuojaimen jonkun toisen kanssa ja sinun täytyy siksi puhdistaa se, poista puhallinyksikkö ennen maskin puhdistamista. **Jos ei, jatka ohjeeseen (5).**

**3** Poista tiivisteruuvi maskin vasemmalta puolelta kiertämällä sitä käsin vastapäivään. Varmista, että säilytät irrotetun tiivisteruuvin turvassa.



**4** Vie toinen käsi maskin sisään siten, että peukalo on maskin ja puhaltimen välissä ja muut sormet puhaltimen alapuolella. Vie toisen käden peukalo puhaltimen yläpuolella olevan aukon päälle ja paina varoen alaspäin kunnes puhallin vapautuu. Vedä puhallinyksikkö ulos. Puhaltimen tulisi irrota ilman voimankäyttöä.



## Puhdistusohjeet (2/2)

**5** Lisää runsaasti tensidejä sisältävää desinfiointiainetta paperipyyhkeeseen.



**6** Aloita ulkopuolelta.



**7** Puhdista sitten joustavat nauhat. Noudata erityistä huolellisuutta puhdistuksessa.



**8** Ota uusi desinfiointiainetta sisältävä pyyhe ja ala puhdistaa maskin sisäpuolta.



**9** Noudata erityistä huolellisuutta puhaltimen sisäpuolta puhdistaessasi. Puhallinyksikköä (ja suodattimia) ei tulisi milloinkaan upottaa nesteeseen.



**10** Jätä kuivumaan ja odottamaan seuraavaa käyttöä.



*VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*



## Istuvuuskokeen ohjeet

Tiki- hengityssuojainta on saatavilla kolmessa eri koossa: pieni (S), keskikokoinen (M) ja suuri (L).

Ennen käyttöä tulee tehdä istuvuuskoe, jolla varmistetaan, että maskiosa on oikean kokoinen ja tiivistyy kunnolla kasvoja vasten. Puhallinyksikköä tai suodattimia ei kiinnitetä maskiin istuvuuskokeen ajaksi.

**1** Aseta maski kasvoillesi (ilman puhallinyksikköä tai suodattimia) ja säädä hihnat siten, että maski on mukavasti kasvoillasi mutta ei liian kireällä.



**2** Aseta paperinpala maskin päälle siten, että se peittää kaksi reikää. Peitä samalla sormella maskin sivussa oleva latausaukko.



**3** Vedä varoen henkeä.



**Jos istuvuus on hyvä**, sinun ei tulisi voida vetää henkeä ja maskin tulisi työnnyä kasvojesi vasten kun yrität hengittää.

**Jos istuvuus on huono**, huomaat, että maskiin virtaa ilmaa. Yritä paikantaa vuoto ja poistaa se. Pelkkä hihnojen kiristäminen tai toisen kokoisen maskin käyttö voi riittää. Tiivisteiden toimintaa voivat haitata myös suuri parta, silmälasit tai maskin sisään valuneet hiukset.

Jos maskin vuoto jatkuu etkä onnistu istuvuuskokeen tekemisessä, maskia ei tule käyttää.

*VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas ei korvaa käyttöopasta ja tässä oletetaan, että käyttäjä tuntee Tiki-maskin, sen käyttöympäristön, käyttöympäristön vaarat, työpaikan ohjeistukset ja paikalliset lait ja rajoitukset.*