

Instrukcje dotyczące zakładania maski (1/2)

Ważna informacja:

- Kompletna maska chroni przed przenikaniem kropli wydychanych wraz z oddechem oraz transmisją aerozoli cząstek stałych.
- Maska zawiera oddzielny zespół dmuchawy oraz akumulatora połączony z filtrem HEPA (P3).
- Dmuchawa wytwarza w masce nadciśnienie, ułatwiając tym samym oddychanie.
- Przed założeniem maski zawsze należy przeprowadzić test dopasowania (patrz oddzielna instrukcja)

1 Upewnić się, że na masce nie ma żadnych widocznych uszkodzeń lub zanieczyszczeń i że akumulator jest w pełni naładowany.



2 W górnej części maski zamocować biały filtr wdechowy, umieszczając go pod kątem 30 stopni, a następnie wyrzeć mocny oraz równomierny docisk, aby ostrożnie przekręcić go w prawo. Aby uniknąć uszkodzenia uszczelki, palce należy umieścić poniżej dmuchawy po wewnętrznej stronie maski i podczas przekręcania filtra delikatnie dociskać go w górę.*



3 Zielony filtr wydechowy zamocować, umieszczając filtr pod kątem 30 stopni nad otworem bagnetowym wentylatora. Ostrożnie docisnąć go w dół i przekręcić w prawo. Uwaga: Nie wkładać go na miejsce na siłę. Podczas przekręcania filtra celem zamocowania w uchwycie bagnetowym powinno dać się usłyszeć lekkie kliknięcie.



4 Zresetować zespół dmuchawy poprzez:
1) przytrzymanie maski do góry nogami
2) jednoczesne naciśnięcie obu przycisków i przytrzymanie ich w stanie wciśniętym do momentu zapalenia się dwóch diod po prawej stronie (po lewej z punktu widzenia użytkownika) i zaprzestania migotania skrajnej diody z prawej strony (dmuchawa nie może uruchomić się)
3) Zwolnienie przycisków.
Dmuchawa jest w tym momencie zresetowana.



5 Założyć maskę.



* **UWAGA:** Niekiedy może okazać się, że filtr, gdy jest on nowy, trudno zamocować. W takim przypadku nie należy używać siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie gwintu! Zamiast tego należy sprawdzić, czy filtr przytrzymywany jest ściśle przy gwincie i w sposób prosty. Następnie przekręcić ponownie z lekkim, lecz równomiernym dociskiem i jednocześnie drugą ręką umieszczoną pod wentylatorem wyrzeć lekki nacisk w kierunku do góry. W momencie, gdy filtr jest prawidłowo zamocowany, powinien być wyczuwalny delikatny opór, a filtr powinien być ustawiony równoległe do wentylatora. Im więcej razy filtr będzie używany, tym łatwiej będzie go zamocować.

Instrukcje dotyczące zakładania maski (2/2)

6 Należy sprawdzić, czy maska jest umieszczona na twarzy w sposób pewny, lecz nie za mocno dociśnięta, aby nie powodować dyskomfortu. Jeżeli maska wymaga regulacji, paski przytrzymujące należy zawsze dociągać od góry do dołu, tzn., najpierw wyregulować górny pasek przytrzymujący i w razie potrzeby dociągnąć go. Należy wyczuć dopasowanie po bokach i w razie potrzeby wyregulować lekko oba paski z boków maski. W razie potrzeby wyregulować tylko pasek znajdujący się najbliżej podbródka. Jeśli maska przylega do twarzy zbyt ciasno, należy lekko poluzować paski. Należy sprawdzić, czy nic nie utrudnia uszczelnienia wokół twarzy (np. włosy lub przykrycie włosów), co mogłoby powodować brak szczelności.



7 Włączyć urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania wciśnięty przez 3 sekundy. Zaczepnąć kilka głębokich wdechów. Zespół dmuchawy powinien automatycznie dostosować obroty i zoptymalizować natężenie strumienia przepływu powietrza.



8 Przetestować działanie alarmu, wkładając dwa palce między uszczelkę a twarz, tak aby powstała szczelina powietrzna.

Alarm powinien włączyć się po 2 sekundach za pomocą błyskania kontrolki i emitowania sygnału dźwiękowego. Sygnały alarmowe emitowane będą co sekundę.

Gdy szczelina zostanie zamknięta, alarm po kilku sekundach powinien ustać.



WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Instrukcje obsługowe

- W czasie, gdy dmuchawa jest włączona, zawsze będzie się świecić lampka po lewej stronie.
- Aby wyregulować obroty dmuchawy, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk wł./wył. Każde naciśnięcie przycisku spowoduje nieznaczne wyregulowanie obrotów. Zmiana obrotów będzie słyszalna i odczuwalna. W przypadku, gdy dmuchawa ponownie przejdzie z trybu obrotów wysokich do niskich, będzie pracować w trybie automatycznym.
- Jeśli prawa kontrolka zacznie migotać i co 5 sekund emitowany będzie alarm dźwiękowy, oznacza to, że czas pracy akumulatora jest na wyczerpaniu i że pozostało ok. 15 minut czasu pracy.
- Istnieje możliwość podłączenia do maski akumulatora zewnętrznego. Przedłuży to czas pracy do 10 dodatkowych godzin.
- Aby włączyć lub wyłączyć wbudowane oświetlenie LED, należy nacisnąć przycisk oznaczony „Light on/off” (wł./ wył. oświetlenia).
- Jeżeli zaczną migotać dwie kontrolki po prawej stronie i co (jedną) sekundę emitowany będzie alarm dźwiękowy, oznacza to, że albo zapchany jest filtr maski, albo wystąpiła poważna nieszczelność powodująca powstanie podciśnienia w masce. Należy natychmiast opuścić obszar.
 - Jeżeli dmuchawa sygnalizuje niski poziom naładowania akumulatora, należy natychmiast opuścić miejsce obszar i przed dalszą eksploatacją maski naładować zgodnie z instrukcją akumulator dmuchawy.
 - Jeżeli dmuchawa sygnalizuje obecność podciśnienia w masce, należy natychmiast opuścić obszar i wymienić filtr. Jeśli nadal sygnalizowany jest alarm podciśnienia, należy sprawdzić, czy nie powstała nieszczelność lub czy maska nie jest uszkodzona.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Instrukcje dotyczące zdejmowania maski

1 Zdjąć maskę, pociągając za pętle pasków.



2 Pociągnąć maskę do góry i nad głowę, dbając jednocześnie, aby nie dotykała ona ubrania.



3 Unikać dotykania twarzy i przedniej części maski.



4 Umieścić maskę w przeznaczonym to tego miejscu.



WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Ładowanie akumulatora maski Tiki

1 Usunąć uszczelkę gwintu po lewej stronie maski. Zadbać o to, aby zdjęta uszczelka gwintu umieszczona została w bezpiecznym miejscu.



2 Podłączyć wtyczkę, wyrównaj trzy wtyczki względem odpowiednich gniazd i wsuń wtyczkę do środka. Ładować do czasu, aż kontrolka w ładowarce zmieni kolor na zielony. Nie zapomnieć, aby po pełnym naładowaniu akumulatora, odłączyć ładowarkę.




WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Podłączanie akumulatora zewnętrznego

1 Przewód akumulatora należy przewlec przez lewy otwór pętli na pasku.



2 Akumulator zewnętrzny podłączyć do przewodu.

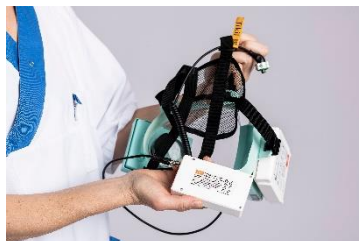

3 Usunąć uszczelkę gwintu po lewej stronie maski. Zadbaj o to, aby zdjęta uszczelka gwintu umieszczona została w bezpiecznym miejscu.



4 Podłączyć przewód akumulatora do maski wyrównując trzy wtyki względem ich gniazd i wsuwając wtyczkę na swoje miejsce. Dokręcić nakrętkę mocującą przewód. Sprawdzić, czy przewód nie zaplątał się.



5 Włączyć urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania wciśnięty przez 3 sekundy.



6 Akumulator zewnętrzny umieścić w kieszeni lub dla większej wygody umocować go za pomocą klipsa do ubrania lub paska.



UWAGA! W czasie, gdy maska nie jest użytkowana akumulator zewnętrzny musi być odłączony, ponieważ w przeciwnym razie rozładuje się on.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Instrukcje dotyczące czyszczenia maski (1/2)

1 Wyjąć filtry, obracając je o 30 stopni w lewo.

Jeżeli filtry mają być używane ponownie, należy je wyczyścić środkiem dezynfekującym w podobny sposób jak maskę. W przeciwnym razie filtry należy przekazać do utylizacji w wyznaczonym miejscu.



2 Umieścić maskę na odkażonej powierzchni.



Czy należy wymontować zespół dmuchawy?

W przypadku, gdy konieczna jest wymiana akumulatora lub jeżeli maska jest współużytkowana z inną osobą i dlatego konieczne jest całkowite wyczyszczenie maski, wówczas przed przystąpieniem do czyszczenia maski należy wyjąć zespół dmuchawy. **W przeciwnym razie należy kontynuować czynności wg kroku nr 5 instrukcji.**

3

Usunąć uszczelkę gwintu po lewej stronie maski. Zadbać o to, aby zdjęta uszczelka gwintu umieszczona została w bezpiecznym miejscu.



4

Jedną rękę włożyć do wnętrza maski, kciuk ustawiając pomiędzy maską a dmuchawą, a pozostałe palce poniżej dmuchawy. Posługując się drugą ręką, umieścić kciuk na otworze powyżej dmuchawy i ostrożnie docisnąć w dół w taki sposób, aż dmuchawa zostanie zwolniona. Wyciągnąć zespół dmuchawy. Do wyjęcia dmuchawy nie powinna być potrzebna siła.



Instrukcje dotyczące czyszczenia maski (2/2)

5 Należy użyć ręcznika papierowego i dodać obfitą ilość środka dezynfekującego z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego.



6 Pracę rozpocząć od zewnętrznej części maski.



7 Czyszczenie kontynuować w odniesieniu do pasków elastycznych. Wykazać się wyjątkową ostrożnością wokół miejsc zagłębionych, takich jak klipsy.



8 Następnie za pomocą nowego ręcznika papierowego nasączonego środkiem dezynfekującym rozpocząć czyszczenie wnętrza maski.



9 Zachować ostrożność przy czyszczeniu wnętrza dmuchawy. Zespół dmuchawy (oraz filtry) w żadnym wypadku nie mogą zostać zanurzone w cieczy.



10 Pozostawić do wyschnięcia przed następnym użyciem.



WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.

Instrukcje testów dopasowania

Maski Tiki medical są dostępne w trzech różnych rozmiarach: małym, średnim i dużym.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeprowadzić test dopasowania, aby sprawdzić, czy maska ma właściwy rozmiar i czy prawidłowo przylega do twarzy użytkownika. W czasie przeprowadzania testu, do maski nie powinny być podłączone ani dmuchawa, ani filtry.

1 Założyć maskę (bez dmuchawy oraz filtrów) i wyregulować paski, sprawdzając, czy maska pasuje do twarzy w sposób komfortowy i czy nie jest zbyt ciasna.



2 Na górze maski umieścić płaski kawałek papieru, sprawdzając, czy zakrywa on dwa otwory. Jednocześnie docisnąć palec, aby zatkać otwór na kabel ładowania z boku maski.



3 Ostrożnie spróbować wykonać wdech.



Jeżeli maska pasuje prawidłowo, wykonanie wdechu nie powinno być możliwe i jednocześnie przy próbie wdechu maska powinna dociskać do twarzy.

Jeżeli maska nie pasuje prawidłowo, można będzie zauważyć, że do jej wnętrza wnika powietrze. Należy spróbować ustalić, w którym miejscu występuje nieszczelność i podjąć próbę wyeliminowania jej. Być może wystarczy naprężyć paski lub zmienić rozmiar maski na inny. Innymi czynnikami, które potencjalnie mogą przeszkadzać w uszczelnieniu, są takie elementy jak duża broda, okulary lub włosy wchodzące do wnętrza maski.

Jeżeli do maski nadal będzie wnikać powietrze i udanego testu nie można będzie przeprowadzić, maska taka nie powinna być już dłużej używana.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Niniejsza instrukcja skrócona nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi i zakłada, że użytkownik został w pełni przeszkolony i zapoznany zarówno z maską Tiki, środowiskiem, w jakim maska ta będzie użytkowana oraz z zagrożeniami obecnymi w takim środowisku, a także wskazówkami dotyczącymi stanowiska pracy oraz lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi i ograniczeniami.