

Pealepanekujuhised (1/2)

Oluline teave:

- Täielikult kokkupandud mask kaitseb hingamisteedest pärinevate piiskade ja osakeste aerosoolleviku eest
- Mask sisaldab eraldi puhuri- ja akuüksust, mis on ühendatud HEPA-filtriga (P3)
- Puhur tekitab maski sisse positiivse rõhu, tänu millele on maski sees lihtne hingata
- Enne pealepanekut tehke alati sobivuse katse (vt eraldi juhiseid)

1 Veenduge, et maskil ei ole nähtavaid kahjustusi ega prahti ja et aku on täielikult laetud.



2 Kinnitage sissehingamiseks mõeldud valge filter maski ülaosale, asetades selle kindla ja püsiva survega 30-kraadise nurga alla ning keerake seda ettevaatlikult paremale. Tihendi kahjustamise vältimiseks asetage sõrmed maski siseküljel puhuri alla ja rakendage keeramisel õrnalt ülespoole survet. *



3 Kinnitage roheline väljahingamisfilter, asetades filtri 30-kraadise nurga alla üle puhuri bajonetteava. Vajutage seda ettevaatlikult allapoole ja keerake paremale. Märkus! Ärge kasutage seda paigaldades survet. Filtrit bajonetti keerates peaksite kuulma kerget klõpsatust.



4 Lähtestage puhuriüksus järgmiselt:
1) hoidke maski tagurpidi;
2) vajutage samaaegselt kahte nuppu, kuni kaks paremal (teie vaatepunktist vasakul) olevat diodi süttivad põlema ja kõige parempoolsem diod lakkab vilkumast (puhur ei käivitu);
3) vabastage nupud.

Puhur on nüüd lähtestatud.



5 Pange mask pähe.



*** MÄRKUS!** Mõnikord võib filtri kinnitamine olla keeruline. Sellisel juhul ärge kasutage jõudu, see võib niite kahjustada! Selle asemel veenduge, et hoiate filtrit tihedalt ja sirgelt niidi vastas. Seejärel pöörake uuesti kerge, kuid püsiva survega ja rakendage samal ajal teise käega puhuri all kerget survet. Kui filter on õigesti kinnitatud, peaksite tundma pehmet takistust ja filter peaks olema puhuriga paralleelselt. Mida rohkem kordi filtrit kasutate, seda lihtsam on seda kinnitada.

Pealepanekujuhised (2/2)

6 Veenduge, et mask istuks näol kindlalt, kuid ei oleks liiga pingul – nii, et see ei tekitaks ebamugavustunnet. Kui peate seda reguleerima, pingutage rihmasid alati ülevalt alla, st kõigepealt reguleerige ülemine rihm ja pingutage vajadusel. Peate külgedel tunda rihmades kerget pinget – vajadusel reguleerige maski külgedel mõlemat rihma. Lõuale kõige lähemal olevat rihma reguleerige ainult vajadusel. Kui mask on teie näol liiga pingul, lükake rihmad lõdvemaks. Veenduge, et miski ei varja näo ümber asuvat tihendit (näiteks juuksed või juuksekatte), mis võib põhjustada lekkeid.



7 Lülitage seade sisse, hoides toitenuppu 3 sekundit all. Hingake paar korda sügavalt. Puhur reguleerib automaatselt kiirust ja optimeerib õhuvoolu.



8 Kontrollige alarmi, sisestades kaks sõrme tihendi ja näo vahele, nii et sinna jääb tühimik.

Alarm peaks helisema 2 sekundi pärast koos välguga ja iga sekundi järel piiksuma.

Kui tühimik on suletud, peaks häire mõne sekundi möödudes lõppema.



VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Kasutusjuhend

- Vasak tuli põleb alati siis, kui puhur on sisse lülitatud.
- Puhuri kiiruse reguleerimiseks vajutage korduvalt sisse/välja-nuppu. Kiirus kohandub vähesel määral iga kliki korral. Kuulete ja tunnete kiiruse muutust. Kui puhuri kiirus muutub kõrgest madalaks, on see automaatrežiimis.
- Kui parem tuli hakkab vilkuma ja te kuulete iga viie sekundi järel helisignaali, hakkab aku tühjenema ning jäänud on umbes 15 minutit tööaega.
- Maskiga on võimalik ühendada väline aku. See pikendab tööaega kuni 10 lisatunni võrra.
- Sisseehitatud LED-tulede sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu „Valgus sisse/välja“.
- Kui kaks parempoolset tuld hakkavad vilkuma ja iga (ühe) sekundi tagant kuulete helisignaali, näitab see, et maskifilter on kas blokeeritud või esineb suur leke, mis põhjustab maskis alarõhu. Lahkuge kohe ohupiirkonnast.
 - Kui puhur hoiatab tühja patarei eest, siis lahkuge enne maski kasutamise jätkamist ohupiirkonnast ja laadige puhurit vastavalt juhistele.
 - Kui puhur hoiatab maski alarõhu eest, siis lahkuge kohe ohupiirkonnast ja vahetage filter. Kui alarõhu alarm peaks endiselt töötama, kontrollige lekkeid või seda, kas mask on kahjustatud.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Eemaldamisjuhised

1 Eemaldage mask, tõmmates rihma aasadest.



2 Tõmmake üles ja üle pea ning veenduge, et mask ei puuduta teie riideid.



3 Vältige maski näo- ja esiosa puudutamist.



4 Asetage mask selleks ettenähtud kohta.



VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Tiki maski laadimine

1 Eemaldage maski vasakul küljel olev kruvitihend. Hoidke eemaldatud kruvitihendit kindlas kohas.



2 Ühendage pistikud kolme tihvti joondamise abil ja lükake pistik sisse. Laadige, kuni laadija märgutuli muutub roheliseks. Kui aku on täis, ühendage laadija kindlasti lahti.




VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Välise aku kinnitamine

1 Võtke akutraat ja keerake see läbi rihma vasaku külje aasa ava.



2 Ühendage väline aku juhtmega.

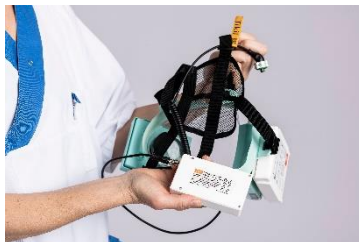

3 Eemaldage maski vasakul küljel olev kruvitihend. Hoidke eemaldatud kruvitihendit kindlas kohas.



4 Ühendage akutraat kolme tihvti joondamisega maski külge ja lükake pistik sisse. Pingutage juhtmekruvi. Veenduge, et traat ei oleks takerdunud.



5 Lülitage seade sisse, hoides toitenuppu 3 sekundit all.



6 Pange välimine aku taskusse või kinnitage see klambriga rõivastele või vööle, et seda oleks mugavam kanda.



NB! Kui maski ei kasutata, tuleb väline aku puhurist lahti ühendada, vastasel korral saab see tühjaks.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Puhastusjuhised (1/2)

1 Eemaldage filtrid, keerates neid 30 kraadi vasakule.

Kui filtreid korduskasutatakse, puhastage neid sarnaselt maskiga desinfektsioonivahendi abil. Muul juhul visake filtrid selleks ettenähtud kohta.



2 Asetage mask saastatud pinnale.



Kas puhuriüksus tuleb eemaldada?

Kui peate patareid vahetama või kui jagate maski kellegi teisega ja peate seetõttu maski täielikult puhastama, peate enne maski puhastamist puhuri eemaldama. **Kui ei, siis jätkake juhistega punktis 5.**

3 Eemaldage maski vasakul küljel olev kruvitihend. Hoidke eemaldatud kruvitihendit kindlas kohas.



4 Asetage üks käsi maski siseküljele, põial maski ja puhuri vahele ning teised sõrmed puhuri alla. Võtke teine käsi, asetage põial puhuri kohal olevale augule ja vajutage ettevaatlikult alla, kuni puhur vabaneb. Tõmmake puhur välja. Puhuri eemaldamiseks ei tohiks jõudu tarvis olla.



Puhastusjuhised (2/2)

5 Võtke paberrätik ja valage sellele ohtralt pindaktiivsete ainete lisandiga desinfektsioonivahendit.



6 Alustage väljastpoolt.



7 Jätkake elastsete rihmadega. Veenduge, et olete süvendatud alade, näiteks klambrite, läheduses eriti ettevaatlik.



8 Võtke uus desinfektsioonivahendiga niisutatud lapp ja alustage maski sisemuse puhastamist.



9 Olge puhuri sisemuse puhastamisel ettevaatlik. Puhurit (ja filtreid) ei tohi kunagi vedelikku kasta.



10 Laske kuni järgmise kasutamiseni kuivada.



VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.

Sobivuse katsetamise juhised

Tiki meditsiinilist maski on saadaval kolmes erinevas suuruses: väike, keskmine ja suur.

Enne kasutamist tuleb teha sobivuse katse, veendumaks, et mask on õige suurusega ja püsib nõuetekohaselt kasutaja näol. Katse ajal ei tohiks puhurit ega filtreid maski külge kinnitada.

1 Pange mask peale (ilma puhuri või filtriteta) ja reguleerige rihmasid, et mask sobiks mugavalt, kuid ei oleks liiga pingul.



2 Lisage maski peale lame paber, veendumaks, et see katab kahte auku. Maski küljel asuva laadimisava katmiseks vajutage samaaegselt sõrme.



3 Proovige ettevaatlikult sisse hingata.



Kui sobivus on õige, ei tohiks teil olla võimalik sisse hingata ja mask surub teie näole, kui proovite seda teha.

Kui sobivus ei ole õige, märkate, et maski lekib õhku. Püüdke aru saada, kus leke asub, ja proovige see kõrvaldada. Võibolla peate lihtsalt rihmasid pingutama või vahetama maski teise suuruse vastu. Muud objektid, nagu näiteks suur habe, prillid või maski tungivad juuksed, võivad olla tihendit kahjustavad tegurid.

Kui maskis on endiselt õhuleke ja katset ei ole võimalik edukalt sooritada, ei tohiks maski kasutada.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE See juhend ei asenda kasutusjuhendit ja eeldab, et kasutaja on täielikult tuttav ja teadlik kogu vajalikust infost, mis puudutab Tiki maski, keskkonda, milles seda kasutatakse, sellises keskkonnas viibimise ohte, töökoha juhiseid kui ka kohalikke seaduseid ja piiranguid.